



PASOS PARA EL USO DEL DEA (DEFIBRILADOR)

1. Identifique los elementos que contiene el DEA (equipo, parches, pilas y kit).
2. Abra el compartimento de las pilas con ayuda de una llave, proceda a colocar las pilas y posteriormente cierre el compartimento.
3. Tome el kit y con las tijeras descubre el pecho del paciente, verifique que esté libre de vello y seco; si no es así con ayuda del rastrillo proceda a rasurarlo y seque con el paño del kit.
4. Retire la cubierta del DEA y utilícela como soporte para el paciente, como se muestra en la imagen.
5. Observe el DEA y verifique si está funcionando (debe marcar una palomita del lado inferior izquierdo).
6. Presione el botón de encendido del DEA y siga las instrucciones, en el equipo se irán encendiendo cada uno de los pasos que debe de seguir.
7. Saque los parches indicados para su paciente (niño hasta 8 años o adulto) y conecte los cables de los parches al DEA.
8. Fije los parches de electrodos del paciente al pecho (siga las instrucciones del paquete de los electrodos).
9. Cuando el indicador luminoso parpadea, **no tocar al paciente** para que el DEA analiza el ritmo.
10. Si el DEA marco "descarga indicada". Esperar a que el indicador luminoso (imagen de corazón) esté parpadeando dar el aviso "manténgase alejados", posteriormente pulse el botón para administrar la descarga.
11. Si el DEA marco "descarga no indicada" **CONTINÚE CON EL PASO 12**
12. Espere el indicador luminoso e inicie con 100 a 120 compresiones por minuto.
13. Continúe con las instrucciones del DEA , si se requiere otra descarga repetir el paso 9, 10, 12 o
14. EL DEA NOS INDICARÁ QUE SE VERIFIQUEN LOS SIGNOS DE VITALES. MANTENER COLOCADOS LOS PARCHES PARA CONTINUAR CON EL MONITOREO, ESPERAR A QUE LLEGUE LA AMBULANCIA, SI RECUPERA EL PULSO COLOCARLO EN POSICIÓN DE SEGURIDAD.

PARTES DEL DEA

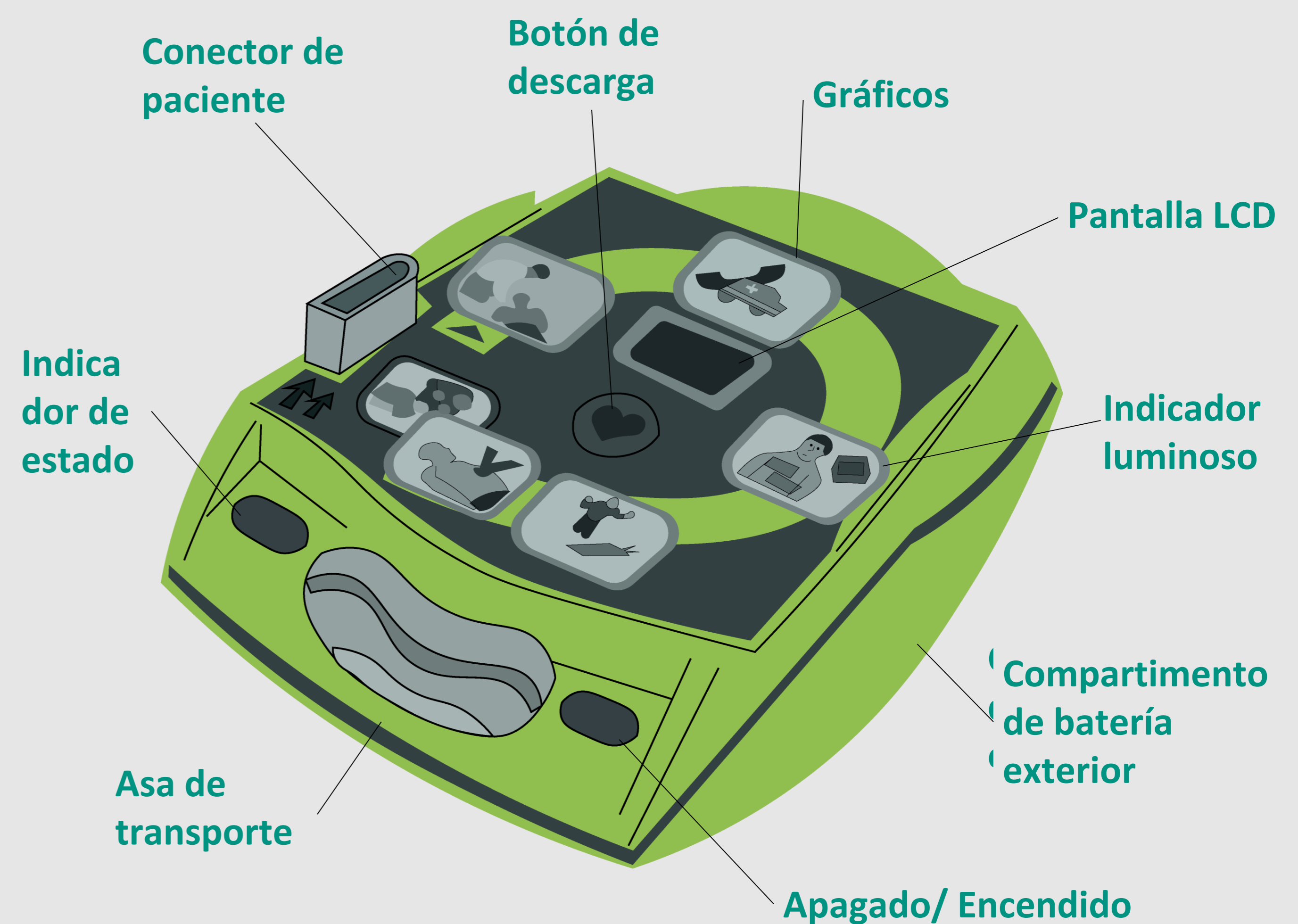

USO DE CUBIERTA

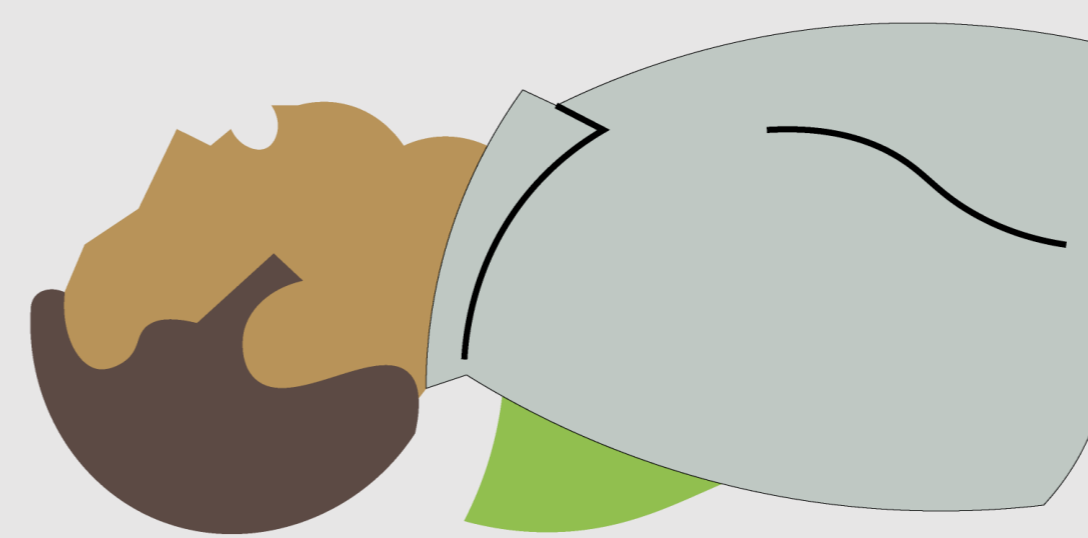

USO DE PARCHES

